



ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДКОЖНИ ИГЛИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Хиподермичната игла за еднократна употреба може да се използва за подкожна инжекция. Тя е подходяща за потребители на различна възраст и е основен метод за вливане.

Основна структура и свойства

- Продуктът се състои от защитна капачка и игла, поставка за игла;
- Този продукт има добри свойства на твърдост, здравина и устойчивост на корозия;
- Защитната капачка и поставката за игла се съчетават добре и никога няма да се разхлабят сами.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

18G до 30G

ИЗПОЛЗВАНЕ

- Използва се заедно с други медицински инструменти;
- Проверете срока на годност и пълнотата на продуктите преди употреба;
- Отворете опаковката от мястото на отваряне и извадете подкожната игла;
- Свържете я плътно със спринцовката;
- Издърпайте защитната капачка на иглата. След това направете асептична манипулация.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Изхвърлете целия въздух в цевта от иглата нагоре, в случай че въздухът бъде инжектиран в човешкото тяло;
- Преди отваряне на опаковката тя трябва да е стерилна и без пироген;
- Срокът на годност е пет години, не я използвайте, ако е след срока на годност;
- Изхвърлете след еднократна употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не използвайте, ако опаковката е отворена или повредена, или защитната капачка е разкъсана, някоя част е пропусната и са открити чужди тела;
- Трябва да се използва от специално обучено лице, а кожата трябва да бъде правилно стерилизирана;
- Продуктите не могат да се използват повторно. Повторната употреба може да доведе до кръстосана инфекция, дори до сериозни заболявания като хепатит, ХИВ и други инфекциозни заболявания.

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът трябва да се съхранява в състояние, при което относителната влажност е по-малка от 80%, също така не трябва да съдържа корозивни газове, да е хладен, сух, с добра вентилация и чист.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВТОРНО	НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ, АКО ОПАКОВКАТА Е ПОВРЕДЕНА	STERILE СТЕРИЛНИ	STERILE EO СТЕРИЛИЗИРАНО С ЕТИЛЕНОВ ОКСИД
MD МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ	UDI УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР НА УСТРОЙСТВОТО	ВНИМАНИЕ	CE 2862
Единична стерилна бариерна система	Единична стерилна бариерна система със защитна външна опаковка		ВЕР.: A/0 ВЛИЗА В СИЛА: 2022-01-24