



# INSTRUCCIONES PARA LOS EQUIPOS DE INFUSIÓN DESECHABLES

## INDICACIONES DE USO

El producto se alimenta sólo por gravedad y se utiliza para la infusión.

### Estructura y propiedades principales

- El tubo y la cámara de goteo son transparentes para facilitar su inspección;
- El tubo es lo suficientemente flexible como para resistir el enrollamiento y la torsión;
- Su diseño de cierre/perforación lo hace conveniente para su manejo y uso;
- El regulador de flujo permite cambiar el caudal de mínimo a máximo.

### USO

- En primer lugar, revise el periodo de validez y la integridad del paquete antes de utilizar el equipo;
- Abra el paquete por la parte cortada y saque el equipo de infusión;
- Cierre el regulador, saque la tapa protectora del dispositivo de cierre/perforación y empuje la punta en el cierre de desinfección del contenedor de fluidos;
- Ponga el contenedor de fluidos boca abajo, presione la cámara y llene hasta la mitad con la solución de inyección. Luego, abra el regulador para expulsar el aire en el tubo.
- Inyecte la vena siguiendo las medidas de manipulación aséptica después de expulsar el aire, y luego fije.
- Observe y cambie la velocidad de flujo a la normalidad.
- La infusión debe ser realizada por unos profesionales de enfermería, para su realización y supervisión.
- 20 gotas=(1±0,1)ml[(1±0,1)g]

### PRECAUCIONES

- Puede causar hipotermia, en especial en pacientes débiles;
- Puede causar un ritmo anormal de los ventrículos del corazón debido a la alta velocidad de flujo;
- Supervise el paciente durante la infusión en caso de cualquier accidente;
- Antes de abrir el paquete, asegúrese de hacerlo en un lugar estéril y libre de pirógenos;
- El producto tiene un periodo de vencimiento de cinco años. No lo use si se pasa de esta fecha.
- Desechar después de un solo uso.

### ADVERTENCIAS

- No utilice el equipo si el paquete está abierto o dañado, si la tapa protectora se ha sacado, si se ha perdido alguna pieza, o si se encuentra alguna materia extraña;
- Debe ser utilizado por una persona capacitada, y la piel debe ser esterilizada.
- Los productos no pueden ser reutilizados. El uso repetido del equipo puede causar infecciones cruzadas, incluso enfermedades graves como la hepatitis, el VIH y otras enfermedades infecciosas.
- Siempre trate los productos contaminantes de la sangre de acuerdo con los procedimientos de peligro biológico establecidos.

### ALMACENAMIENTO

El producto debe guardarse bajo una humedad relativa inferior al 80%, en un lugar libre de gases corrosivos, fresco, seco, con buena ventilación y limpio.

**Cualquier incidente grave relacionado con el equipo debe ser notificado a las autoridades competentes del fabricante y del Estado Miembro en el que se encuentra el usuario y / o el paciente.**

NO REUTILIZAR	NO UTILIZAR SI EL PAQUETE ESTÁ DAÑADO	<b>STERILE</b> ESTERILIZAR	<b>STERILE EO</b> ESTERILIZAR CON ÓXIDO DE ETILENO
<b>MD</b> DISPOSITIVO MÉDICO	<b>UDI</b> IDENTIFICADOR ÚNICO DEL DISPOSITIVO	PRECAUCIÓN	CONTIENE o HAY PRESENCIA de FTALATOS
Sistema de barrera estéril simple	Sistema de barrera estéril simple con paquete protector exterior	REV.: B/0 VIGENTE: 10-07-2023	