



ИНСТРУКЦИИ ЗА СПРИНЦОВКИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Спринцовките за еднократна употреба са специално проектирани като инструмент за инжектиране на разтвор във вена и подкожна инжекция в човешкото тяло. Спринцовките за еднократна употреба трябва да се използват заедно с иглата.

Основна структура и свойства

- Този продукт е съставен от цилиндър, бутало и помпа.
- Тази цев трябва да бъде чиста и достатъчно прозрачна, за да се наблюдава лесно.
- Цевта и буталото съвпадат добре и имат добро свойство да се плъзгат, могат да се използват лесно.
- Буталото е лесно и удобно за работа и използване.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Трикомпонентни спринцовки, включващи от 1 ml до 60 ml;
- Двуконпонентни спринцовки, включващи от 2 ml до 20 ml.

ИЗПОЛЗВАНЕ

- Първо, проверете срока на валидност и цялостта на опаковката, преди да я използвате;
- Разкъсайте опаковката в отрязаната част и извадете спринцовката без игла;
- Натиснете и издърпайте буталото, докато се смаже добре;
- Съединете спринцовката с иглата, проверете дали иглата е плътно свързана със спринцовката;
- Отстранете предпазната капачка на иглата, след което направете стерилна манипулация според изискванията.

Предупреждения и предпазни мерки

- Отстранете целия въздух в цевта от иглата нагоре, в случай че се появи газов балон, ако въздухът се инжектира в кръвоносните съдове на човешкото тяло, или тумор, ако газът се инжектира в подкожието;
- Преди отваряне на опаковката тя трябва да е стерилна и без пироген;
- Срокът му на годност е пет години, не я използвайте, ако срокът му на годност е изтекъл;
- Изхвърлете след еднократна употреба;
- Не използвайте, ако опаковката е отворена или повредена, или защитната капачка е разкъсана, или са открити чужди тела;
- Трябва да се използва от специално обучено лице, а кожата трябва да бъде правилно стерилизирана;
- Продуктите не могат да се използват повторно. Повторната употреба може да доведе до кръстосана инфекция, дори до сериозни заболявания като хепатит, ХИВ и други инфекциозни заболявания.

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът трябва да се съхранява в състояние, при което относителната влажност е по-малка от 80%, също така не трябва да съдържа корозивни газове, да е хладен, сух, с добра вентилация и чист.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВТОРНО	НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ, АКО ОПАКОВКАТА Е ПОВРЕДЕНА	STERILE СТЕРИЛНО	STERILE EO СТЕРИЛИЗИРАНО С ПОМОЩТА НА ЕТИЛЕНОВ ОКСИД
MD МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ	UDI УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР НА ИЗДЕЛИЕТО	ВНИМАНИЕ	CE 2862
Единична стерилна бариерна система	Единична стерилна бариерна система със защитна външна опаковка	VER.: A/0 ВЛИЗА В СИЛА: 2022-01-24	